

AEDライフキャビネット 取扱説明書 ver. 2.1

株式会社 マイセック SE事業部
愛知県西春日井郡豊山町豊場志水80番
TEL 0568-39-0831
FAX 0568-39-0828
URL <http://www.misec.co.jp>

仕 様

屋内仕様 電気用品安全法 適合性検査合格品

材 質：硬質発泡ウレタン製

寸 法

	外寸	内寸	重量
ヒーター機能なし	W550×D210×H370mm	W500×D170×H330mm	8kg
ヒーター内蔵タイプ	W550×D210×H370mm	W450×D170×H330mm	9kg
ファン付きタイプ(ヒーターなし)	W598×D210×H370mm	W450×D170×H330mm	9kg

	外寸	重量
スタンドタイプ	W650×D400×H1613mm	上記重量+19kg

電 源

ヒーター内蔵タイプ	100V 50/60Hz 21W(38W at 5°C) 管ヒューズ 1A
ファン付きタイプ(ヒーターなし)	100V 50/60Hz ※ファン仕様 12V 0.24A

付属品：アラーム 約 115db 単4乾電池 2本

ネジ穴位置決めダンボール 1枚 **※ご注意!** 本体壁面取付けネジは含まれておりません。

スタンドタイプのみプロセブマット(4枚組)が付属します。

機 能：●扉を開けるとアラームが鳴ります。アラームが鳴ることで、周囲へ緊急事態発生を知らせる他、盗難及びいたずら等の防止に役立ちます。

●ヒーター内蔵タイプは、庫内温度 5°Cになると自動でヒーターに通電し庫内を暖めます。庫内が温まり 8°Cになると OFF になります。

●ファン付きタイプは、庫内温度が 35°Cになると自動でファンに通電し温度上昇を抑制します。庫内温度が 35°C未満になると OFF になります。

注意事項：●扉などに指を挟まれないよう十分注意して下さい。

●鋭利なもので衝撃を与えないで下さい。

●アラームは単4乾電池のため、電池の消耗により鳴らなくなる前に取り替えをして下さい。

●ぶらさがりや、寄りかからないでください。破損・転倒の恐れがあり「ケガ」の原因になります。

●本体ごと持ち上げて下さい。ハンドルやファンのカバーを持つと破損する恐れがあります。

●清掃の為にたわし又は磨き粉を使用しないで下さい。キズがつくことがあります。

●扉の開閉に必要な以上の力を加えないで下さい。破損する恐れがあります。


●扉が開いている時に寄りかかるなどで、扉に負荷をかけないで下さい。破損する恐れがあります。

●扉を閉める際、「カチッ」とロック音がしたことを確認して下さい。


●本製品は壁面又は専用スタンドに水平に取り付けて下さい。

●同梱されている「壁掛け用金具」を本体裏面のネジ穴に水平に取付け壁面の壁掛け用ネジに掛けて下さい。

- 使用方法：●アラームを使用するには、庫内のアラームに乾電池(単4電池2本)を入れた後、アラームをONにしてください。アラームが鳴りますが、扉を閉めることでアラームは止まります。扉を開けた際にアラームが作動します。
- ヒーター内蔵タイプを使用する場合、電源コードを100Vコンセントに挿し庫内LEDランプが点灯することを確認してください。

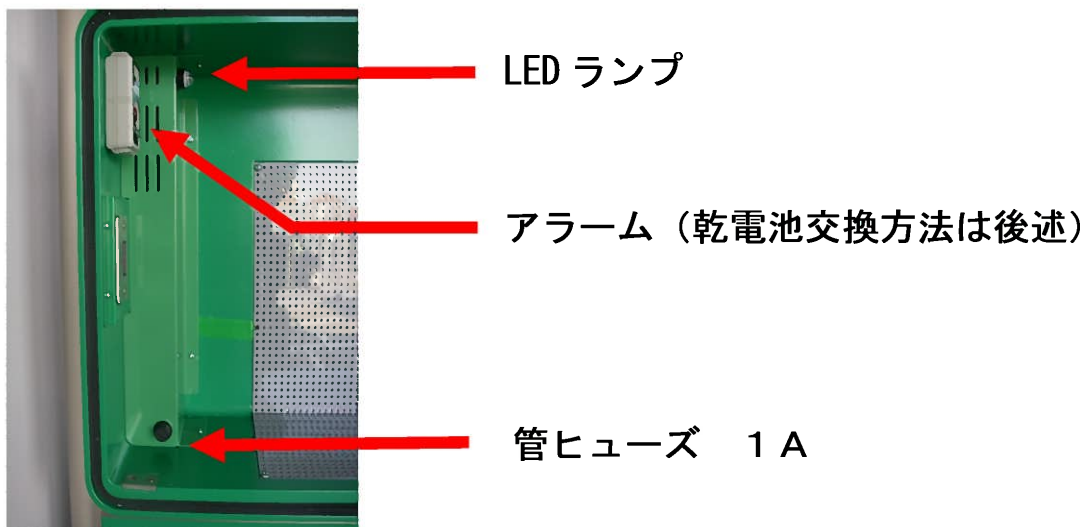

- ファン付きタイプを使用する場合、電源コードを100Vコンセントに挿して下さい。庫内温度が35℃になると自動でファンに通電し温度上昇を抑制します。庫内温度が35℃未満になるとOFFになります。
- スタンド取付方法：同梱されているプロセブンマットを円盤下に取り付け、床に固定するかアンカーで床に固定して下さい。固定アンカーは別途ご用意下さい。(穴径10mm用)

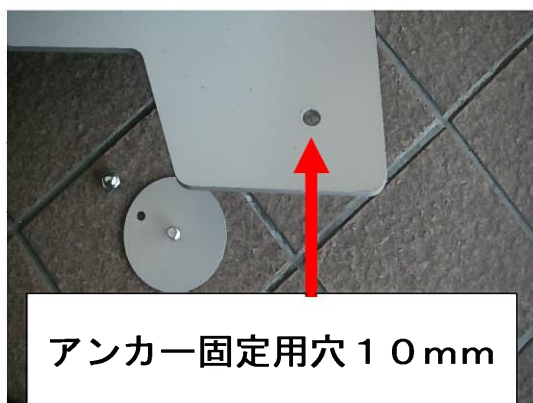

- ケース固定方法：同梱されている壁掛けガイドシートにて、目印を付け、アンカーや木ネジ等にて4箇所固定します。※ご注意! 本体壁面取付けネジは含まれておりません。



AED ライフキャビネット日常点検

点検手順 (※扉が開いている時に扉に負荷をかけないで下さい。扉が破損する恐れがあります。)



①ブザー音・乾電池消耗確認

扉を開けた時警報ブザーが鳴る事を確認して下さい。
ブザー音が小さい場合や鳴らない時は電池交換願います。
単4乾電池 2個
ブザー音確認後、警報機奥側のスイッチを上
にスライドさせ電源を切ってから下記点検を行います。



②電源導通確認(ヒーター付き仕様のみ)

庫内左上のLEDランプが点灯している事を確認して下さい。
点灯していれば正常に動作しています。
100V コンセントに電源挿入されていても点灯しない場合は弊社
にご連絡願います。



③扉ラッチの確認

扉のラッチの受け側ネジが緩んでいない事を確認して下さい。
緩んでいる場合はプラスドライバーで締め、扉の開閉調整を行って下さい。

ラッチ調整後に扉を閉める際、

カチッとロック音がしたことを確認して下さい。

上記点検終了後、①で切った警報機のスイッチを入れ、扉を閉めた際にブザーが止まる事を確認して下さい。

製品保証書

品名 A E D ライフキャビネット

形式

製品番号

お客様住所

機関・会社名

所属・お名前

ご購入年月日

保証期間 ご購入後 1 年間

下記の通り保証します。

保証規定

- 1 首記製品を安心してご使用願う為に、その品質を保証し保証期間内に万一通常のご使用にも拘らず故障が発生いたしました場合は、お買い上げ店または(株)マイセック S E 事業部までご連絡下さい。無償にて修理させていただきます。
- 2 保証期間中でありましても、次の場合は修理に要した実費を頂戴致します。
 - ① 誤ったお取り扱いに関する起因
 - ② 改造、または不当な修理をされた場合
 - ③ 火災・地震などの天変地異に起因する場合
 - ④ 輸送された事に起因する場合
 - ⑤ 保証書のない場合またはサービス員に保証書のご提示がない場合
 - ⑥ 消耗品に類する物

この保証書は日本国内においてのみ有効です。

ご購入年月日ご記入後 F A X にてご返送下さいます様お願い申し上げます。

〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町豊場字志水80番
TEL 0568-39-0831 FAX 0568-39-0828
E-mail se@misc.co.jp

フリーダイヤル F A X 0120-510-602